

Brugsanvisning STOPSNOT Mundspray - Junior (DK)

Om STOPSNOT Mundspray

STOPSNOT Mundspray kan bruges til understøttende behandling af virale infektioner i de øvre luftveje.

STOPSNOT Mundspray kan bruges af børn over 1 år og voksne.

STOPSNOT Mundspray kan også bruges af gravide og under amning.

STOPSNOT Mundspray indeholder ingen konserveringsmidler. Et sterilt filter i flasken garanterer sterilitet af opløsningen selv efter gentagen brug.

STOPSNOT Mundspray har en lokal effekt og optages ikke i kroppen.

STOPSNOT Mundspray er godkendt som Medicinsk Udstyr klasse IIa.

Indhold

STOPSNOT Mundspray er en klar, farveløs, viskøs opløsning med kirsebærsmag.

1 ml af opløsningen indeholder 1,2 mg iota-carrageenan (Carragelose®), natriumchlorid, rensat vand, xylitol, kirsebærsmag og buffer. Carragelose® er en naturlig, aktiv bestanddel udledt af rødtang

Egenskaber

Forkølelsesvira kommer primært ind i kroppen gennem munden og næsen. Virus, der kommer ind gennem munden sætter sig fast på mundslimhinden. Her formerer og spreder virusen sig.

De typiske symptomer er en blokeret eller løbende næse, ondt i halsen og/eller hovedpine, hoste m.v.

STOPSNOT Mundspray indeholder Carragelose®. Carragelose® stabiliserer den fugtgivende beskyttelsesfilm på slimhinderne i munden og svælget, så filmen forbliver på slimhinderne i længere tid.

Denne film virker som en fysisk barriere, der kan beskytte mod ydre påvirkninger.

Kontakt altid din læge ved alvorlige symptomer, hvis du har høj feber eller hvis symptomerne varer mere end en uge.

Til understøttende behandling af virale infektioner i de øvre luftveje.

Til befugtning af slimhinderne i munden og svælget i tilfælde af f.eks. hoste, hæshed eller ondt i halsen.

Til understøttende behandling af alle gener som følge af tørre og/eller irriterede slimhinder i mund og svælg.

Dosering og brug

Sprøjt STOPSNOT Mundspray minimum 3 gange i halsen og flere gange om dagen indtil symptomerne er forsvundet.

Fjern beskyttelseskappen og pump om nødvendigt et par gange indtil der kommer en ensartet forstøvet spray. STOPSNOT Mundspray er nu klar til brug.

Hold flasken lodret ved brug.

Mulige bivirkninger/Interaktioner med andre produkter

Hidtil er ingen bivirkninger blevet rapporteret. Undersøgelser af interaktioner med andre produkter er ikke udført.

Særlige forholdsregler for sikker brug

Brug ikke STOPSNOT Mundspray hvis du er allergisk over for nogen af indholdsstofferne i produktet.

STOPSNOT Mundspray er ikke medicin. Hvis der optræder feber og/eller symptomerne er vedvarende, skal du kontakte din læge.

Af hygiejniske årsager og for at undgå overførsel af patogener, bør sprayflasken altid bruges af én og samme person.

Opbevares uden for børns rækkevidde!

Pakkestørrelse

20 ml flaske med forstøver. 1 spray = 0,14 ml opløsning.

Opbevaring

STOPSNOT Mundspray har en holdbarhed på 36 måneder fra fremstillingsdatoen. På grund af det særlige filtersystem forbliver opløsningen steril selv efter gentagen brug.

STOPSNOT Mundspray kan anvendes i 12 måneder efter første brug. Kassér derefter flasken.

Opbevar STOPSNOT Mundspray mellem 5 °C og 30 °C og beskyt flasken mod lys.

Producent:

Mono chem-pharm Produkte GmbH, Leystraße 129, A-1200 Wien

Distributør:

Cura Nordic ApS, DK-3460 Birkerød

Dato for revision: august 2016

STERILE | A |  0408

Bruksanvisning STOPSNOT Munnspray - Junior (NO)

Om STOPSNOT Munnspray

STOPSNOT Munnspray kan brukes til støttende behandling av virale infeksjoner i de øvre luftveier.

STOPSNOT Munnspray kan brukes av barn over 1 år og voksne.

STOPSNOT Munnspray kan også brukes av gravide og ved amming.

STOPSNOT Munnspray inneholder ingen konserveringsmidler. Et sterilt filter i flasken garanterer sterilitet av løsningen selv etter gjentatt bruk.

STOPSNOT Munnspray har en lokal effekt og tas ikke opp i kroppen.

STOPSNOT Munnspray er godkjent som Medisinsk Utstyr klasse IIa.

Innehold

STOPSNOT Munnspray er en klar, fargeløs, viskøs løsning med kirsebærsmak.

1 ml av løsningen inneholder 1,2 mg iota-carrageenan (Carragelose®), natriumklorid, renset vann, xylitol, kirsebærsmak og buffer. Carragelose® er en naturlig, aktiv bestanddel fra rødtang.

Egenskaper

Forkjølelsesvirus kommer primært inn i kroppen gjennom munnen og nesen. Virus, som kommer inn gjennom munnen setter seg fast på slimhinnen i munnen. Her formerer og sprer viruset seg.

De typiske symptomene er en tett eller rennende nese, vondt i halsen og/eller hodepine, hoste m.v.

STOPSNOT Munnspray inneholder Carragelose®. Carragelose® stabiliserer den fuktighetsgivende beskyttende film på slimhinnene i munnen og halsen, slik at filmen forblir på slimhinnen i lang tid.

Denne filmen virker som en fysisk barriere, som kan beskytte mot ytre påvirkninger.

Kontakt alltid din lege ved alvorlige symptomer, dersom du har høy feber eller om symptomene varer mere end en uke.

Terapeutiske indikasjoner

Til støttende behandling av virale infeksjoner i de øvre luftveier.

Til fukting av slimhinnene i munnen og svelget ved tilfeller av eks. hoste, heshet eller vondt i halsen.

Til støttende behandling av alle plager forbundet med tørre og/eller irriterte slimhinner i munn og svelg.

Dosering og bruk

Sprøyt STOPSNOT Munnspray minimum 3 ganger i halsen og flere ganger om dagen inntil symptomene er forsvunnet.

Fjern beskyttelseskappen og pump om nødvendig et par ganger inntil det kommer en ensartet forstøvet spray. STOPSNOT Munnspray er nå klar til bruk.

Hold flasken loddrett ved bruk.

Mulige bivirkninger/Interaksjoner med andre produkter

Hittil har ingen bivirkninger blitt rapportert. Undersøkelser av interaksjoner med andre produkter er ikke utført.

Særlige forholdsregler for sikker bruk

Bruk ikke STOPSNOT Munnspray hvis du er allergisk mot noen av innholdsstoffene i produktet.

STOPSNOT Munnspray er ikke medisin. Hvis det oppstår feber og/eller symptomene er vedvarende, skal du kontakte din lege.

Av hygieniske årsaker og for å unngå overførsel av patogener, bør sprayflasken alltid brukes av én og samme person.

Oppbevares utenfor barns rekkevidde!

Pakkestørrelse

20 ml flaske med forstøver. 1 spray = 0,14 ml oppløsning

Oppbevaring

STOPSNOT Munnspray har en holdbarhet på 36 måneder fra produksjonsdato. På grund av det spesielle filtersystemet forblir oppløsningen steril selv etter gjentatt bruk.

STOPSNOT Munnspray kan anvendes i inntil 12 måneder etter første gangs bruk. Kast deretter flasken.

Oppbevar STOPSNOT Munnspray mellom 5 °C og 30 °C og beskytt flasken mot lys.

Produsent:

Mono chem-pharm Produkte GmbH, Leystraße 129, A-1200 Wien

Distributør:

Cura Nordic ApS, DK-3460 Birkerød

Dato for revisjon: august 2016

STERILE | A |  0408